

**LEOMAX**

# ИНСТРУКЦИЯ БРАСЛЕТ ЗДОРОВЬЯ



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение «Браслета Здоровья» от Leomax. Пожалуйста, внимательно изучите данное «Руководство по эксплуатации». Оно содержит важные указания по безопасности эксплуатации устройства и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если устройство перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с данным руководством.

## Основная информация

«Браслет Здоровья» - это устройство, предназначенное для ношения на руке с целью мониторинга и оценки уровня физической активности. Он регистрирует данные о физическом состоянии организма, когда вы отдыхаете, идете или бежите. Его можно носить каждый день. Браслет оснащен датчиком, который отслеживает пульс, артериальное давление, а также измеряет пройденное

расстояние и рассчитывает потерянные калории. Не требует подключения через мобильные приложения и к интернету.

## Экраны браслета

### Шагомер

Встроенный акселерометр позволит вам узнать количество шагов, которое вы сделали за день.

### Измерение расстояния

Данная функция станет незаменимой для определения эффективности пробежки или ходьбы. Вы сможете замерить пройденное расстояние.

### Расчет потерянных калорий

«Браслет Здоровья» рассчитывает количество калорий, затраченных в течение дня.

**2**

## Пульсометр

Функция пульсометра позволит вам получать актуальные данные о вашем сердечном ритме и рассчитать наиболее оптимальные нагрузки для организма.



## Измерение артериального давления

Устройство регистрирует показания артериального давления, что очень удобно, если вы страдаете гипертонией или гипотонией, позволяя постоянно контролировать изменение давления.



**Переключение между экранами:** однократное нажатие на экран.

**ВАЖНО** соблюдать правила измерения показателей:

1. Замерять сидя в спокойном состоянии;
2. Не разговаривать во время измерения;
3. Держать руку в горизонтальном положении

**3**

(напр.на столе) не двигаясь;

4. Дождаться финального показателя;
5. Для получения наиболее точных показаний произвести до 3-х замеров подряд.

## Ношение «Браслета Здоровья»

Устройство можно носить на любой руке на расстоянии двух пальцев от кости запястья. Браслет должен плотно прилегать к руке, но его не следует затягивать слишком сильно или слишком слабо. Чтобы «Браслет Здоровья» мог отслеживать ваш пульс, он должен быть зафиксирован на запястье. Во время упражнений затяните браслет чуть сильнее. По окончании занятий ослабьте его.

## Уход за «Браслетом Здоровья»

Чтобы предотвратить раздражение кожи, правильно затягивайте браслет и регулярно очищайте его. Промывайте «Браслет Здоровья» водопроводной водой и полностью его высушивайте, в частности после интенсивной активности, потоотделения

**4**

или использования устройства снаружи. Если вы замечаете следы раздражения или аллергической реакции, снимите устройство. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

## Включение и выключение «Браслета Здоровья»

**ВНИМАНИЕ!** перед началом использования браслет необходимо зарядить через: компьютер, планшет, ноутбук, power bank. Не требует переходника

### Включение

Приложить палец к экрану на 2 секунды, устройство станет активным.

### Выключение

Приложить палец к экрану на 3 секунды, пока экран устройства не погаснет.

### Зарядка браслета

1.Значок разряженного (пустого) аккумулятора появится на дисплее, когда заряд батареи будет низкий или будет подходить к концу.


**5**

2. Процесс полной зарядки батареи обычно занимает 1-2 часа.

3. Полностью заряженное устройство работает около 7 дней.

1. Отстегните ремень от электронного циферблата.

2. Вставьте элемент питания браслета в USB порт зарядного устройства.

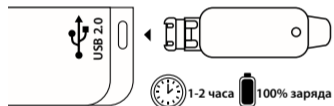

3. После зарядки устройства, снова пристегните ремень к электронному циферблату.

**Примечание:** Для поддержания необходимого срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать устройство хотя бы раз в месяц, даже если не предполагается его использование в течение длительного времени.

6

### Хранение:

Хранить устройство следует вне досягаемости малолетних детей (младших возрастных групп дошкольного возраста), чтобы исключить случайное попадание инородного тела внутрь.



Элемент питания расположен на противоположной от кнопки включения стороне.

7

### Основные характеристики:

#### Функции

Пульс	Да
Давление	Да
Шагомер	Да
Измерение расстояния	Да
Расчет потерянных калорий	Да
Встроенные часы	Нет
Отслеживание сна	Нет

#### Технические характеристики

Гарантия	1 год
Страна	Китай
Ширина браслета	18 мм
Высота	10 мм

8

Окружность браслета	24 см
Цвет	черный
Вес	26 г

#### Дисплей

Тип дисплея	TFT display
-------------	-------------

#### Комплектация

Ремень на руку	в комплекте
Инструкция	в комплекте

#### Встроенная память

Встроенная память (ROM)	нет
-------------------------	-----

#### Индикация

Индикатор уровня зарядки	Да
Индикация включения	Да

9

### Корпус

Материал корпуса	Пластик, силикон
------------------	------------------

#### Серия модели

Серия	Leomax-001
-------	------------

#### Электропитание

Аккумулятор	встроенный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Зарядка от USB порта	Да
Работа от аккумулятора	до 7 суток

#### Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Утилизируйте устройство отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего

10

товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

**Внимание!** «Браслет Здоровья» не требует специального медицинского обследования или специальных консультаций с лечащим врачом. Данное устройство не является медицинским прибором и предназначено только для личного, а не клинического использования. Прибор не содержит каких-либо компонентов, излучений и прочих неблагоприятных для организма человека факторов.

Информация, полученная с помощью устройства, не может служить в качестве врачебной рекомендации.



11