

## Наколенник Leomax «Двигайся легко»

### Руководство по эксплуатации

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Leomax.

Пожалуйста, внимательно изучите данное «Руководство по эксплуатации». Оно содержит важную информацию и указания по безопасности и эксплуатации устройства.

#### Основная информация:

Во время ходьбы, бега или занятий спортом коленные суставы подвергаются высоким нагрузкам и напряжению, так как выполняют функцию амортизатора и стабилизатора. С наколенником «Двигайся легко» от Leomax Вы убедитесь, что быть активным можно в любом возрасте!

#### Он способствует:

- надежной фиксации коленного сустава
- уменьшению нагрузки и напряжения мышц
- улучшению кровотока


Во время ходьбы наколенник создает микромассажное действие, способствуя облегчению боли в мышцах и суставах. Он не сковывает и не затрудняет движения, а эластичная бесшовная ткань при соприкосновении с кожей обеспечивает сухое тепло, мягко воздействуя на зону коленной чашечки. Наколенник «Двигайся легко» выполнен из дышащей ткани, поэтому комфортен для ношения в течение дня. Вы почувствуете лёгкость и комфорт в каждом движении!



2 эластичных ремня  
на липучках



Трехмерная фиксация  
коленного сустава

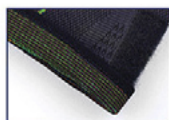

Нескользящая  
резинка



Высокоэластичный  
материал



Воздухопроницаемая  
ткань



### **Меры безопасности:**

- Не рекомендуется носить людям, страдающим от болезней с повышенной кровоточивостью, гемофилии;
- Не рекомендуется носить беременным;
- Не рекомендуется носить при онкологических заболеваниях;
- Не рекомендуется носить при индивидуальной непереносимости и/или аллергических реакциях;
- Категорически запрещается носить наколенник «Двигайся легко», если у Вас сердечная недостаточность и/или при ношении кардиостимуляторов;
- Категорически запрещается носить при лихорадке, открытых ранах, повышенной кровоточивости;
- Наколенник рекомендуется снимать на ночь.

### **Эксплуатация:**

1. Надеть наколенник на левую или правую ногу в области коленного сустава
2. Зафиксировать ремни на липучке

### **!Наколенник не должен пережимать ногу или сползать с ноги!**

### **Рекомендации по применению:**

При первом применении рекомендуется надеть наколенник на 15 минут, после чего снять и проверить себя на наличие аллергических реакций (пятен, покраснений, вздутий и т.д.)

Если вы не уверены, есть ли у Вас аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость, требуется проконсультироваться с врачом.

После этого начинайте проводить процедуры длительностью от 1 часа в день.

Постепенно увеличивайте время процедуры в течение 3-х месяцев. Далее необходимо сделать перерыв. Повторить курс через 3 месяца.

### **Характеристики:**

Материал: 50% латекс, 40% спандекс, 10% нейлон

Размер: универсальный

### **Размеры изделия\***

Длина: 29 см

Верхняя ширина: 18,5 см

Нижняя ширина: 16,5 см

Охват ноги: 45-55 см

Количество ремней: 2 шт.

\*Размер может отличаться на  $\pm 2$  см

