

LEOMAX

ФОКУС ПЛЮС

Складные очки с увеличительными линзами


Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку складных очков с увеличительными линзами ФОКУС ПЛЮС. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.

Использование

1. Складные увеличительные очки ФОКУС ПЛЮС можно использовать самостоятельно или вместе с обычными очками для коррекции зрения или контактными линзами. Их нужно надевать так, чтобы носовой упор держался на кончике Вашего носа, а не как обычные очки.
2. Если Вы используете складные очки ФОКУС ПЛЮС вместе с очками для корректировки зрения, оставьте немного места между двумя очками, чтобы подобрать правильный фокус.
3. Чтобы подобрать правильный фокус и получить крупное чёткое изображение, держите предмет на расстоянии примерно 30-40 см от очков ФОКУС ПЛЮС.
4. При правильно подобранном фокусе очки ФОКУС ПЛЮС дают зрительное увеличение объекта 160% по сравнению с реальным.

Неправильный способ Правильный способ

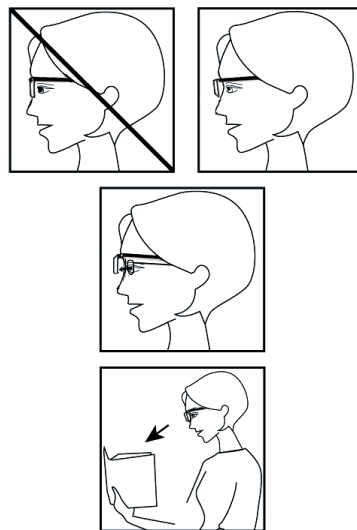

Инструкции по безопасности

- Не смотрите на солнце, когда на Вас надеты очки ФОКУС ПЛЮС. Это может привести к повреждению Ваших глаз
- Не надевайте очки ФОКУС ПЛЮС во время вождения транспортных средств или выполнения любых действий, связанных с повышенной опасностью
- Не надевайте очки ФОКУС ПЛЮС во время движения

Уход и очистка

1. Для очистки очков ФОКУС ПЛЮС от загрязнения и следов от пальцев используйте мягкую ткань
2. Можно использовать для очистки воду и нейтральные моющие средства
3. Не используйте для очистки очков ФОКУС ПЛЮС алкоголь или другие растворители
4. Не нужно тереть очки с усилием при их очистке, это может привести к появлению царапин на линзах.

Внимание!

Складные очки с увеличительными линзами ФОКУС ПЛЮС не предназначены для исправления дефектов зрения и не являются очками для корректировки зрения. При наличии выраженных проблем со зрением рекомендуется обратиться к врачу.