

LEOMAX

Наколенник LEOMAX «Будь активным» с магнитами



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой LEOMAX. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Меры безопасности:

- не рекомендуется носить людям, страдающим от болезней с повышенной кровоточивостью, гемофилии;
- не рекомендуется носить беременным;
- не рекомендуется носить при онкологических заболеваниях;
- не рекомендуется носить при индивидуальной непереносимости и/или аллергических реакциях;
- категорически запрещается носить наколенник «Будь активным», если у вас сердечная недостаточность и/или при ношении кардиостимуляторов;
- категорически запрещается носить при лихорадке, открытых ранах, повышенной кровоточивости;
- наколенник LEOMAX «Будь активным» с магнитами рекомендуется снимать на ночь.

Эксплуатация:

- надеть наколенник чуть ниже колена в области голени;
- зафиксировать на липучке;
- наколенник не должен пережимать ногу или сползать с ноги.

Рекомендации по применению:

- при первом применении рекомендуется надеть наколенник на 15 минут, после чего снять и проверить себя на наличие аллергической реакции (пятен, покраснений, вздутий и т.д.);
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергическая реакция и/или индивидуальная непереносимость, требуется проконсультироваться с врачом;
- после этого начинайте проводить процедуры длительностью от 1 часа в день;
- постепенно увеличивайте время проведения процедуры в течение 3х месяцев;
- через 3 месяца необходимо сделать перерыв;
- повторите курс через 3 месяца.

Характеристики:

- Материал: 50% полиэстер, 50% неопрен
- Размер: универсальный
- 2 магнита вшиты в липучку
- Высота: 14 см
- Длина: 29 см
- Длина ремешка: 25 см
- Максимальный обхват: 44 см

