

5. Оптимальные способы использования и ношения устройства.

1. Соблюдая полярность, вставьте батарейку в батарейный отсек и закройте его крышку. Наденьте на устройство ушной вкладыш подходящего Вам размера. Отрегулируйте уровень громкости до необходимого Вам значения.
2. Вставляйте устройство в ухо стороной с ушным вкладышем.
3. Убедитесь в том, что ушной вкладыш полностью надет на устройство и плотно вставлен в ушной канал. Усиливаемый звук будет передаваться искаженно, если ушной вкладыш неправильно вставлен в ушной канал.
4. Используйте палец для контроля и регулировки уровня громкости. Будьте внимательны: не закрывайте отверстие микрофона рукой или пальцем. Если это произойдет, то Вы услышите звук высокого тона.

6. ВНИМАНИЕ:

- а) Данное устройство является водонепроницаемым, поэтому позаботьтесь о том, чтобы внутрь него не попадала вода. Если в устройство все же попала вода или влага, извлеките батарейку, поместите устройство в теплое место и дайте ему просохнуть.
- б) Очень важно увеличивать уровень громкости постепенно, для того чтобы избежать его внезапного увеличения. Слишком громкий звук может повредить слух.
- в) Никогда не используйте воду для чистки устройства. Храните устройство в сухом месте и во входящем в комплектацию пластмассовом контейнере.
- г) Данное устройство не является медицинским прибором и не предназначено для его использования в качестве слухового аппарата. Если у Вас нарушен слух, то, пожалуйста, обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Включая данное устройство, изначально всегда устанавливайте минимальный уровень громкости.
2. Медленно регулируйте уровень громкости, плавно приближаясь к комфортному уровню.
3. Если уровень громкости установлен на максимальное значение, а слышимость слишком низкая, требуется замена батарейки.
4. Данное устройство не является игрушкой, пожалуйста, держите его подальше от детей.
5. Перед использованием устройства убедитесь в том, что ушной вкладыш плотно вставлен в ушной канал и правильно надет на устройство.
6. Периодически проверяйте ушной вкладыш на наличие в нем грязи или ушной серы. При их обнаружении прочистите ушной вкладыш.

LEOMAX

Инструкция пользователя

Усилитель слуха Чудо-слух




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальная входная мощность: 110 ± 5 Дб
2. Коэффициент усиления: ≥ 30 Дб
3. Искажение гармоник: $\leq 10\%$
4. Частотный диапазон: 300-400 Гц
5. Входной шум: ≤ 40 Дб
6. Напряжение питания: 1.5 В
7. Сила тока: ≤ 4 мА.

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования данного устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией Пользователя.

Детали Усилителя слуха Чудо-слух:

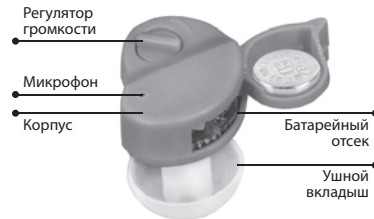

Для данного устройства подходят алкалиновые батарейки AG3 или цинково-воздушные батарейки А312.

Строго соблюдайте полярность!

- "+" Положительный электрод батарейки
- "-" Отрицательный электрод батарейки.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ СЛУХА ЧУДО-СЛУХ

1. Установка батареек.

Откройте батарейный отсек и, строго соблюдая полярность, вставьте в него алкалиновую батарейку AG 3 или цинково-воздушную батарейку А312. Установив батарейку, закройте крышку батарейного отсека.

2. Индивидуальный подбор и установка ушного вкладыша.

Чтобы выбрать ушной вкладыш нужного Вам размера, поочередно устанавливайте вкладыши разных размеров в гнездо усилителя звука и затем вставляйте их в ухо. Вкладыш должен входить плотно, но при этом Вы не должны испытывать дискомфорт.

ВНИМАНИЕ! Никогда не вставляйте в ухо только сам вкладыш, т.к. без закрепления на усилителе, его удаление из уха может быть затруднительным.

3. Включение и выключение устройства.

Данное устройство не оснащено кнопкой

включения/выключения. Эту функцию выполняет крышка батарейного отсека. Когда батарейка вставлена в батарейный отсек и крышка закрыта, то устройство **ВКЛЮЧЕНО**; когда крышка батарейного отсека открыта, то устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.

ВНИМАНИЕ! Не забывайте открывать крышку батарейного отсека, тем самым выключая устройство в то время, когда Вы им не пользуетесь. Это поможет Вам сохранить заряд батареи и продлить срок ее службы.

4. Регулировка уровня громкости.

Для регулировки уровня громкости устройства поверните регулятор громкости. На регулятор нанесен соответствующий значок, указывающий направление увеличения и уменьшения уровня громкости. Пользователям рекомендуется регулировать уровень громкости начиная с самого низкого уровня и затем увеличивать ее до необходимого уровня слышимости.